

Protección para Pacientes-Para Láser e IPL



Protección desde 180nm hasta 10600nm

EN207 L-Rating

D 180-315 L9
R 180-395 L3
D>315-1400 L6
IR>315-1400 L7
DI>1400-10600 L4

Instrucciones de Uso para Gafas protectoras paciente

1. Examine las gafas de protección láser e IPL para ver si tienen posibles puntos visibles en la zona de los casquetes oculares por los cuales pueda penetrar la luz. Hacemos hincapié en que los casquetes oculares dañados pueden reducir considerablemente o incluso eliminar la protección que ofrecen unas gafas protectoras en perfecto estado.
2. No reforme ni modifique estas gafas.
3. El puente nasal lo podrá ajustar acercando o apartando mutuamente los casquetes oculares. Varíe el ajuste encajando cada vez en una muesca hasta que las gafas queden bien ajustadas.
4. Para que las gafas correctamente colocadas queden bien ajustadas, las correas de seguridad tendrán que estar amarradas, pero no demasiado tensas. Para evitar una penetración de luz por los bordes exteriores de las gafas, los casquetes oculares deberán tener un perfecto contacto con la piel.
5. Guarde el producto en su caja cuando no se use.

Cuidado y limpieza: Recomendamos soluciones detergentes a base de agua para todas las piezas.